

# WCS® Verband- und Wundtherapieschuh

Die Komplettlösung zur Sofortversorgung und gezielten Druckentlastung bei Diabetes



## Hilfsmittelnummern

### GKV:

> 31.03.03.4023 (Verbandschuh, Kurzzeit / Langzeit)

### AOK Bayern:

> 31.00.03.0307 (Wundtherapieschuh)

> 31.00.03.0308 (Wundtherapieschuh als Ausgleichsschuh)

### AOK Baden-Württemberg:

> 31.00.03.0301 (Wundtherapieschuh)

> 31.00.03.0302 (Wundtherapieschuh als Ausgleichsschuh)



**DARCO**

# Alle Vorteile auf einen Blick

## Innenfutter

- > Nahtfrei und ultrasoft
- > Desinfizierbar

## Klettverschluss

- > Optimale Anpassung
- > Ideal für bewegungs-  
eingeschränkte  
Patienten



## Komfort

- > Formstabil und langlebig
- > Weit zu öffnen
- > Aufnahme von  
voluminösen Verbänden

## Fersenkappe

- > Perfekter Halt
- > Stabil

## Obermaterial

- > Individuell bearbeitbar
- > Zur gezielten Druck-  
entlastung

## Außensohle

- > Abrollsohle
- > Für Innen- und  
Außenbereich
- > Kein Federn

## Decksohle

- > Ultrasoftes,  
geschlossenzelliges  
Plastazote®

## Kennzeichnung

- > Zur exakten  
Größenbestimmung

## Sohlensystem

- > 4-Sohlen-System
- > Individuell anpassbar



## INDIKATIONEN

- > Bei Behandlung des diabetischen Fußsyndroms
- > Zur Abheilung offener Wunden, belasteten Ulzerationen und Geschwüren
- > Ulzerationen bis zu Wagner-Grad 3
- > Zur Druckentlastung
- > In der postoperativen Phase nach Zehen und / oder Vorfußoperationen
- > Knochenvorsprünge

# Höchstmaß an individueller Anpassung

Der WCS® kann ohne großen Aufwand individuell an jeden Patientenfuß zur gezielten Druckentlastung angepasst werden.

## Zuschnitt des Obermaterials

Für eine gezielte Entlastung im dorso-medialen oder lateralen Anteil des Fußes (Malum perforans) kann die äußere Lederschicht des Schuhoberteils im Bereich der Wunde entfernt werden. Das weiche Plastazote®-Material des Innenschuhs bleibt dabei intakt.



## Zuschnitt der Innensohle

Das austauschbare 4-Sohlen-System mit unterschiedlichen Shore-Härten sorgt für eine optimale Druckumverteilung. Durch die Konstruktion und das handwerkliche Nachbearbeiten der Innensohle wird eine punktgenaue Druckentlastung plantar, medial und lateral ermöglicht.



### SOHLENAUFBAU

Unterschiedliche Shore-Härten zur optimalen Druckumverteilung

| Material       | Dichte    | Dicke  | Durometerwert* |
|----------------|-----------|--------|----------------|
| Plastazote®    | gering    | 6,3 mm | 26*            |
| EVA            | mittel    | 6,3 mm | 42*            |
| EVA            | stark     | 6,3 mm | 50*            |
| Einlagenschaum | hochdicht | 3,1 mm | 29*            |

\*Abweichung der angegebenen Werte um 2° bis 3° möglich

### Anwendungsbeispiel Sohlenzuschnitt



# Artikelliste

GRÖSSE                      ART.-NR.    GRÖSSE                      ART.-NR.    GRÖSSE                      ART.-NR.

## WCS®

Farbe: Schwarz

|     |             |
|-----|-------------|
| XS  | 35,0 – 36,0 |
| S   | 37,0 – 38,0 |
| S/M | 39,0 – 40,0 |
| M   | 41,0 – 42,0 |
| L   | 43,0 – 44,0 |
| XL  | 45,0 – 46,0 |
| XXL | 47,0 – 48,0 |

Rechts

|         |
|---------|
| WCS0B/R |
| WCS1B/R |
| WCS7B/R |
| WCS2B/R |
| WCS3B/R |
| WCS4B/R |
| WCS5B/R |

Links

|         |
|---------|
| WCS0B/L |
| WCS1B/L |
| WCS7B/L |
| WCS2B/L |
| WCS3B/L |
| WCS4B/L |
| WCS5B/L |

PZN 10225295

## Zehenkappe

Rechts

|          |
|----------|
| TCWCS0/R |
| TCWCS1/R |
| TCWCS7/R |
| TCWCS2/R |
| TCWCS3/R |
| TCWCS4/R |
| TCWCS5/R |

Links

|          |
|----------|
| TCWCS0/L |
| TCWCS1/L |
| TCWCS7/L |
| TCWCS2/L |
| TCWCS3/L |
| TCWCS4/L |
| TCWCS5/L |

## TwinShoe®


Farbe: Schwarz

|    |             |      |
|----|-------------|------|
| XS | 33,5 – 37,0 | TS0B |
| S  | 37,5 – 39,5 | TS1B |
| M  | 40,0 – 41,5 | TS2B |
| L  | 42,0 – 44,0 | TS3B |
| XL | 44,5 – 47,0 | TS4B |

PZN 10225160

## Größen und Maße

Alle Maße sind in cm angegeben und entsprechen der Größe der Innensole. Die angegebenen Schuhgrößen sind Richtwerte. Die Wahl der Schuhgröße richtet sich maßgeblich nach dem Volumen der jeweiligen Verbandsversorgung.

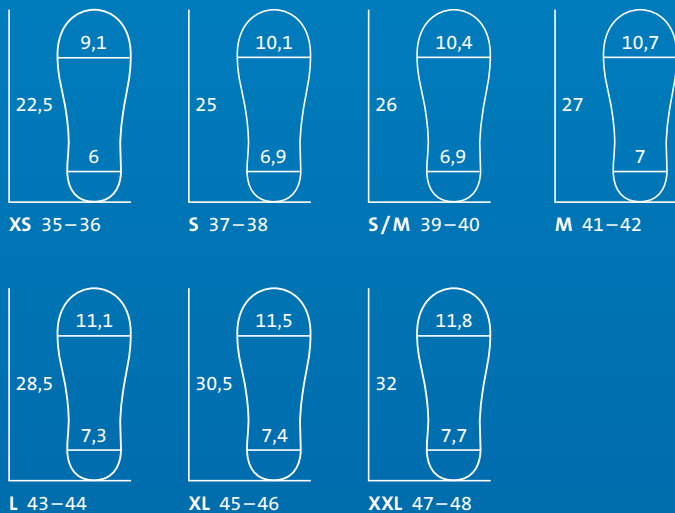

## Optional erhältlich:



**TwinShoe®**  
> Zum Höhenausgleich 31.03.03.8001



**Zehenkappe**  
> Verhindert Eindringen von Fremdkörpern  
> Kälte- und Nässeschutz  
> Dehnbar und luftdurchlässig

## Rezeptbeispiel WCS®

Name der Krankenkasse: Mustermann, H. Musterstraße 10 55555 Musterstadt 12.03.1958

Produktname: **WCS® Verbandsschuh/Wundtherapieschuh**

Indikation: z.B. zur Abheilung offener Wunden, Ulcera und Geschwüren

Hilfsmittelnummer: 31.03.03.4023

### Tipps zur Verordnung:

Konfektionierte Sohlen haben keine eigene Hilfsmittelnummer. Die angegebenen Abrechnungshinweise sind unverbindliche Vorschläge.

- Das **Feld Nummer 7** (Hilfsmittel) muss markiert werden. Hier geben Sie an, dass es sich um eine Verordnung eines Hilfsmittels handelt.
- 10-stellige **Hilfsmittelnummer: 31.03.03.4023**
- Produktname: **WCS® Verbandsschuh / Wundtherapieschuh**
- Genauere Indikation/Diagnose:  
**Z. B. zur Abheilung offener Wunden, Ulcera und Geschwüren**



Produktvideo